



PPR-109.5  
Rev. 06/2020

**INFORME SOBRE PRUEBA DE ALCOHOL POR ALIENTO**

Fecha mes/ día/ año	Hora Comenzó la Prueba	Lugar Donde se Realizó la Prueba	
Número de Querella		Número de Serie del Instrumento	Número de Tarjeta
Nombre Legal del Detenido		Nombre Preferido	Seguro Social
Dirección exacta			Infracción Ley 22-2000
Nombre del Agente que Arresto a la Persona		Placa	Unidad de Trabajo
Nombre del Agente Operador		Placa	Unidad de Trabajo

**PASOS OPERACIONALES**

Marque con una X, según complete los Pasos:

1.  Identifique la tarjeta de récord de prueba de aliento y deslice en la impresora externa.
2.  Presione el botón "Start", color verde en la pantalla táctil.
3.  Información Agente que arresta/Arresting Officer Information:
  - a. Nombre del Agente que arresta/Officer First Name, presionar tecla "Enter"
  - b. Inicial Agente que arresta/ Officer Middle Name presionar tecla "Enter"
  - c. Apellidos Agente que arresta/ Officer Last Name, presionar tecla "Enter"
  - d. Número de Placa/offcier Badget Number, presiona tecla "Enter"
  - e. Número de querella / Q# registre los últimos números de la querella, presiona tecla "Enter"
4.  Información del arrestado/Subject Information
  - a. Nombre del arrestado/Subject First Name, presionar tecla "Enter"
  - b. inicial del arrestado, Subject-Middle Name, presionar tecla "Enter"
  - c. Apellidos del arrestado/Subject Last Name, presionar tecla "Enter"
  - d. Fecha de nacimiento del arrestado/ Mes, Día, Año/Subject Date of Birth MMDDYY, presiona tecla "Enter".
  - e. Número de licencia de conducir del arrestado/Subject Driver License, presionar tecla "Enter"
  - f. Abreviatura procedencia de la licencia de conducir del arrestado/State of Issue, presionar tecla "Enter"
  - g. Género: Presione en la pantalla táctil, femenino-masculino y se desconoce/Subject Gender, presiona tecla "Enter".
5.  Verificación de data/Review data, Presione review/Continue en la pantalla táctil para continuar
6.  Al finalizar el "Air Blank", coloque la boquilla en el conducto de aliento.
7.  Indique a la persona que inhale y sople (please Blow) profundamente hasta que el pito deje de sonar y al finalizar remueva la boquilla del conducto de aliento.
8.  Al finalizar el "Air Blank", presione en la pantalla táctil el icono imprimir/print.
9.  Remueva la tarjeta de prueba.

Firma Operador	Placa
----------------	-------

**ORIGINAL-FISCAL**